

Lungflute®

by  medical acoustics

Flauto Polmonare

Rapida, efficace, innovativa metodica per **mobilizzare le secrezioni**

Ora è possibile respirare meglio con un rivoluzionario, efficace ausilio per rimuovere facilmente il muco: il **Flauto Polmonare** o **Lung Flute!**

Il **Flauto Polmonare** è un semplice strumento che aiuta a rimuovere, mobilizzare e eliminare le secrezioni dalle vie aeree in pochi minuti. **Unico ausilio medico** sul mercato approvato per la rimozione del muco mediante vibrazioni acustiche, che stimolano il sistema naturale di rimozione delle secrezioni del corpo umano.

Che cosa è:

Per chi soffre di congestione cronica della mucosa causata da patologie di **BPCO** (BroncoPneumopatia Cronica Ostruttiva), **asma, enfisema, bronchite, polmonite** e altri disturbi respiratori, spesso è difficile, se non impossibile, riuscire ad espellere il muco dal torace. Il **Flauto Polmonare** è una metodica efficace, non-invasiva, facile da usare, che non richiede uso di farmaci: è infatti sufficiente soffiare nel boccaglio con una forza non superiore a quella necessaria a spegnere una candela.

Approvato per uso medico negli Stati Uniti ed in Europa, studi clinici hanno dimostrato come il **Flauto Polmonare** offra i seguenti vantaggi e benefici:

- Facile da usare.
- Non necessita alcuna regolazione.
- Mobilizza le secrezioni dal profondo del polmone.
- Funziona a pressioni molto basse con un minimo sforzo.
- Usato **due volte al giorno** migliora la qualità della vita nei pazienti con BPCO.

Nota: il **Flauto Polmonare** è indicato per terapia con pressione positiva espiratoria dall'FDA Americana, è approvato per uso terapeutico negli Stati Uniti, Europa ed altri paesi.
Il Flauto Polmonare non ha controindicazioni.



SENSORMEDICS
Italia

NOVITA'



? Come funziona il Flauto Polmonare?


by  medical acoustics



1 Le secrezioni che si accumulano nei bronchi sono difficili da espellere!

2

Soffiando per qualche minuto nel **Flauto Polmonare**, esercizio di estrema facilità, si generano delle vibrazioni che agiscono sulle secrezioni nel polmone, rendendole meno spesse e mobilizzandole, supportando il meccanismo naturale corporeo di espulsione del muco.

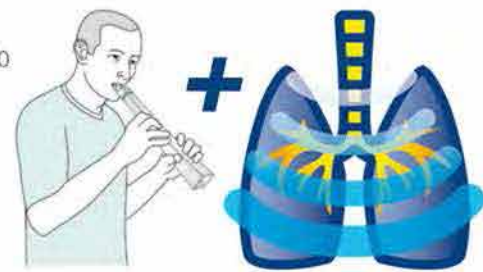

3 Il flauto e le sue onde acustiche agiscono sul muco ottenendo un risultato finale simile alla trasformazione da gelatina a liquido. Il paziente è a questo punto in grado di espettorare il muco reso meno spesso, così che i polmoni siano ripuliti e vi sia una diminuzione dei sintomi.

Per informazioni e PER ORDINARE il FLAUTO POLMONARE:



Via A. Meucci 1/A
30020 Noventa di Piave (VE)
Tel. 0421 658875
Fax. 0421 308287
info@tergas.it

Distributore per l'Italia:



Sensormedics Italia srl
Via G. Balzaretti 28 - 20133 Milano
Tel: +39 02 2774121
www.sensormedics.it
flautopolmonare@sensormedics.it
info@sensormedics.it